



1

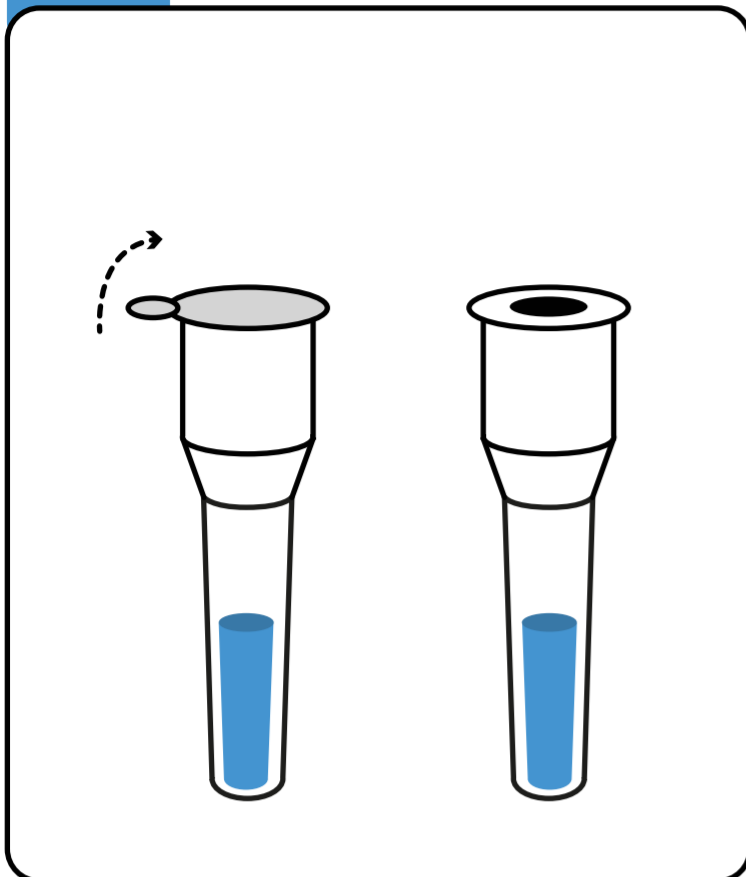

Nuo ekstrahavimo mėgintuvėlio su buferiu nuplėškite apsauginę foliją.


2

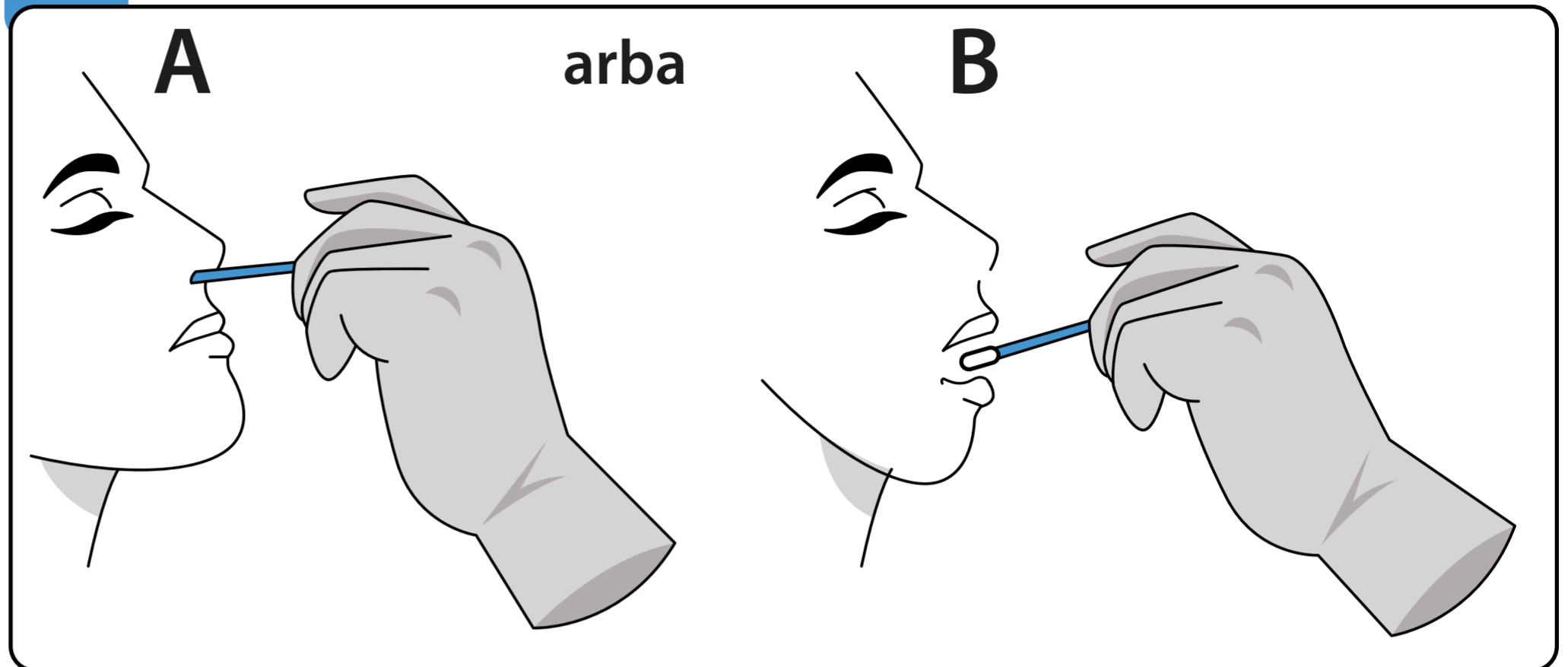

A. Įkiškite sterilų tepinėlio tamponą į nosies landą apie 2,5 cm. Tamponą sukite 3 ratus pagal nosies landos sienelę. Ištraukite tepinėlį.


B. Plačiai pražiokite burną. Tamponėliu švelniai 3 kartus pirmyn-atgal patrinkite tonziles, tada tris kartus pirmyn-atgal patrinkite užpakalinę ryklės sienelę. Ištraukite tepinėlį.

3

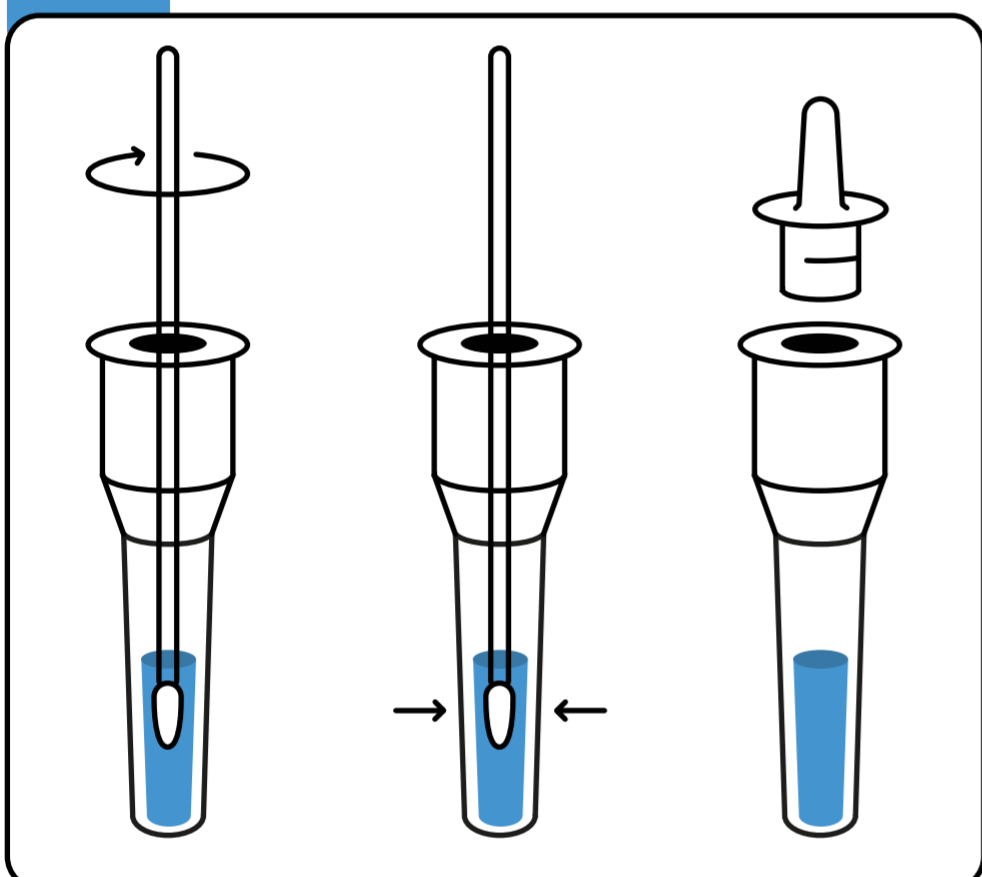


Įdėkite tepinėlį į mėgintuvėlį su ekstrahavimo tirpalu. Prispauskite prie vidinės mėgintuvėlio sienelės ir sukite tepinėlį maždaug 10 s., prispaudžiant tepinėlio galvutę prie vidinės sienelės, kad antigenai išsiskirtų į ekstrahavimo mėgintuvėlį. Užkimškite dangteliu.

4

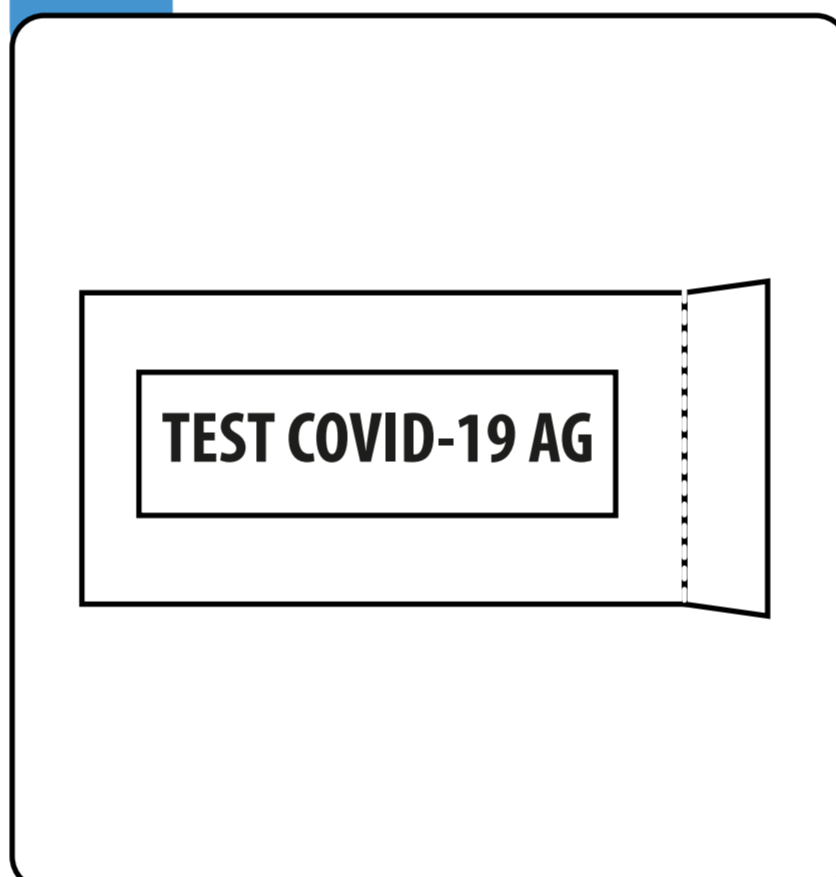


Išimkite testo kasetę iš sandarios pakuotės ir panaudokite per vieną valandą. Tiksliausi rezultatai bus pasiekti, jei testas bus atliktas iškart atidarius pakuotę.

5

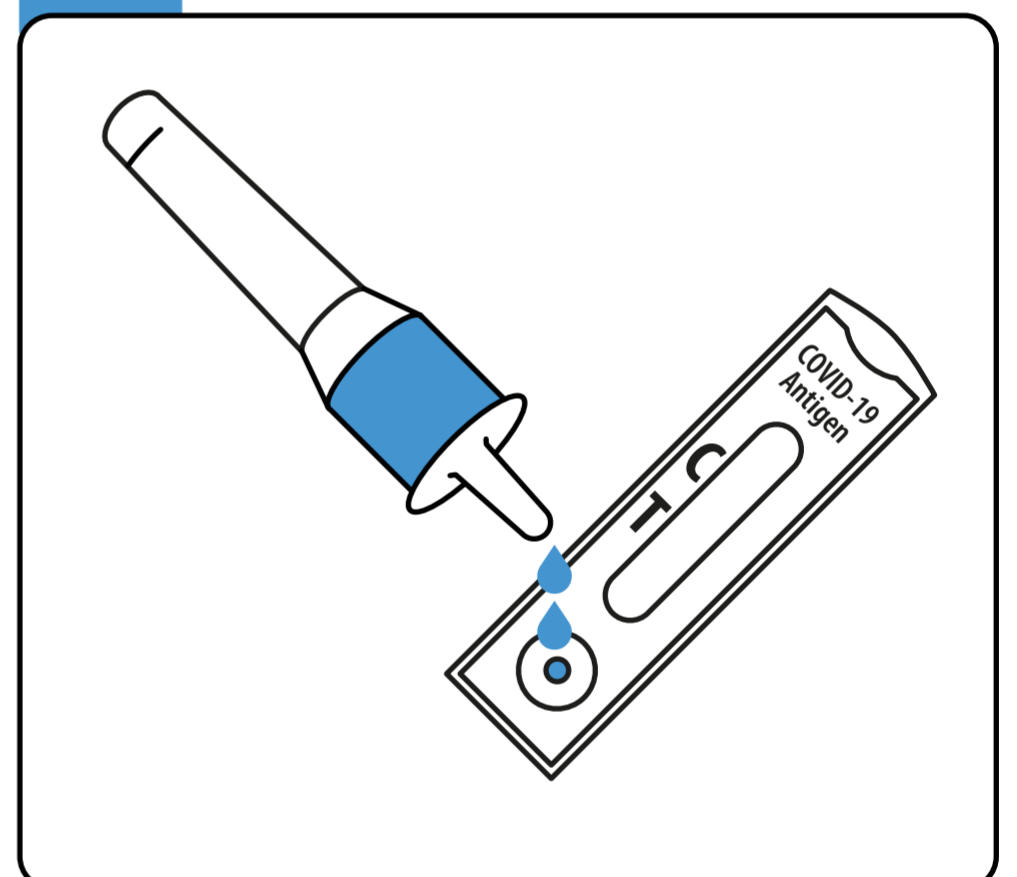

Apverskite mėginio ekstrahavimo mėgintuvėlį ir į mėginio duobutę įlašinkite 3 lašus ekstrahuoto mėginio (apytiksliai 100 µl) ir paleiskite laikmatį.

6

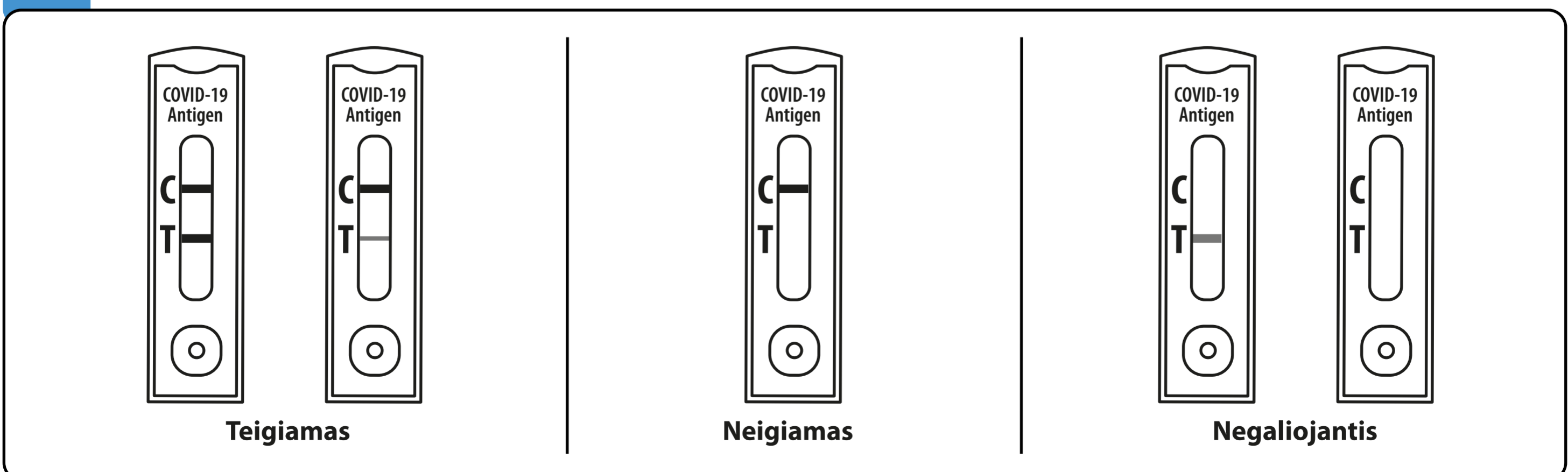

Palaukite, kol pasirodys spalvota (-os) linija (-os). Vertinkite rezultatą po 2-15 minučių.